

# Kasutusjuhend

ProtecSomi tolmulestavastane kate on mõeldud inimestele, kellel on tolmulestaallergia. Kate on toodetud vastavalt standardile ISO 13485:2016 ja vastab meditsiiniseadmete määruse (EL) 2017/745 nõuetele.



## Soovitused enne paigaldamist



Esimene pesu enne kasutamist muudab Teie katted pehmemaks ja paindlikumaks.



Võimalusel peske oma patju ja tekki temperatuuril 60 °C. Kui see ei ole võimalik, raputage neid õues ning puhastage eelistatult HEPA filtriga tolmuimejaga.



Kui madrats on juba kasutuses, puhastage see hoolikalt tolmuimejaga mõlemalt küljelt, võimalusel HEPA filtriga tolmuimejaga, et vähendada madratsis olevate allergeenide hulka.


## Padja, teki ja madratsikatte paigaldamine

### Padi ja tekk

Pange iga ese eraldi tolmulestavastasesse kattesesse. Seejärel keerake kangast klapp katte seestpoolt tõmbluku alla. Klapp aitab vältida allergeenide lekkimist tõmbluku kaudu. Sulgege kate tõmblukuga. Seejärel pange oma tavalised padja- ja tekikatted peale.

### Madrats

**Samm 1.** Kui võimalik, paigaldage madratsikatte koos teise inimesega. See teeb paigaldamise lihtsamaks. Seiske madratsi mõlemal küljel ja tõmmake kate ühtlaselt madratsi ümber. Kui peate kattet üksi paigaldama, istuge madratsi kõrvale ja tõmmake kate järk-järgult mööda madratsit üles järgides "zig zagi" joont.

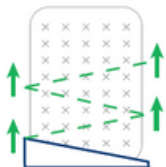

**Samm 2.** Asetage kangast klapp tõmbluku alla ja sulgege oma tolmulestavastane madratsikate.

**Samm 3.** Tolmulestavastase katte peale pange oma aluslina või kaitselina (kui kasutate seda) ning seejärel tavaline kummiga aluslina.



Kui kangas satub kogemata tõmbluku vahele nii, et lukk jääb kinni, ärge riskige katte rebimisega. Üks nipp on panna tõmblukule tilk toiduõli ja seejärel vabastada kangas, tõmmates seda ettevaatlikult tõmbluku kelgu kõrvale.

## Ohutusvaru

Selleks et Teie madratsikatte paigaldamine oleks lihtsam ja et tagada katte tõhus filtratsioon, on katte pikkusele ja laiuzele lisatud mõne sentimeetri suurune ohutusvaru.

Texaal® Coton madratsikate, mille te saate, on alguses suurem kui tellitud mõõdud ning see on normaalne. Puuvill on looduslik kiud, mis pesus järk-järgult kokku tõmbub. Texaal® Coton kokkutõmbumise määr on enne tootmist täpselt teada, seetõttu arvestame katte valmistamisel kokkutõmbumisvaruga 1,5–6 % (sõltuvalt kangapartii eripärast). Pärast mitut pesukorda saavutab kate oma lõpliku mõõdu.

## Katte hooldus

ProtecSomi katted on pestavad temperatuuril 60 °C koos Teie tavalise pesuvahendiga ning neid võib kuivatada trummelkuivatis. Ärge lisage pesule pesuloputusvahendit ja ärge triikige katted. On tungivalt mittesoovitav kasutada kloorvalgendit ega muid tooteid peale tavalise pesuvahendi.

### Soovituslik pesusagedus :

- Madratsikate: Kaks korda aastas.
- Tekikate: Üks kord kuus.
- Padjakate: Üks kord kuus.

Peske oma Texaal® Coton katted nii, et tõmblukud on lahti.

## Ettevaatusabinõud kasutamisel

Palun teavitage igast tõsisest intsidendist pädevaid järelevalveasutusi ning tootjat. Kui ProtecSomi kate näitab kulumise märke või te näete auke, tuleb kate parandada või välja vahetada.

## Kliiniline kasu

ProtecSomi katted aitavad aktiivselt vähendada tolmulestaallergia sümptomeid.

## Toimivusomadused

ProtecSomi katete efektiivsus on uuringutega tõestatud. Katted filtreerivad tolmulestaallergeene mehaaniliselt ning säilitavad samal ajal Teie magamismugavuse.

